

PromepAR:

Aerocámara Multivalvular

Cámara Espaciadora Valvulada

Venta Libre

PromepAR:

Aerocámara Multivalvular
Cámara Espaciadora Valvulada





PromepAR® Aerocámara es una cámara espaciadora valvulada diseñada para optimizar la entrega de medicación al utilizar inhaladores de dosis medida (IDM). Los IDM son comúnmente utilizados para tratar enfermedades respiratorias. El principio operativo de un IDM es que se debe "presionar" e "inhalar" simultáneamente. Para algunos pacientes, como los niños o los ancianos, lograr esta coordinación puede ser difícil. Una mala coordinación resulta en una menor dosis de medicación alcanzando los pulmones y una mayor deposición en la boca y garganta.

El uso de la **PromepAR® Aerocámara** implica la técnica evitando la coordinación necesaria para un tratamiento efectivo con IDM, de esta manera, reduciendo la deposición en la oro-faringe que puede causar efectos secundarios no deseados y un tratamiento sub-óptimo.








Fabricada en material Anti-Estático, la **PromepAR® Aerocámara** entrega una mayor dosis de partículas respirables comparada con las tradicionales cámaras espaciadoras de plástico, que por su carga estática pueden retener partículas terapéuticas. Ahora los pacientes de todas las edades pueden asegurarse un tratamiento más eficiente y unadosificación consistente de su IDM, logrando así un tratamiento óptimo y una mejor calidad de vida.

INSTRUCCIONES DE LAVADO.

PromepAR® Aerocámara debe ser higienizada antes de su primer uso y luego de manera semanal.

- 1 Retire la base solamente.**
No retire la máscara o el porta-válvula. 
- 2 Enjabone ambas partes por 15 minutos en una solución suave de detergente líquido para vajilla y agua tibia limpia. Agite suavemente.** 
- 3 No enjuague la cámara ya que esto puede generar carga estática. Si le preocupa el riesgo de una dermatitis por contacto, enjuague solo la máscara en agua.** 
- 4 Sacuda el exceso de agua de las partes y deje secar en posición vertical. Asegúrese que las partes estén secas antes de re-ensamblar. No frote para secar.** 
- 5 Para re-ensamblar, centre la base (perpendicular) con la máscara.** 

INSTRUCCIONES DE USO. (Sólo para un paciente individual)

- 1** Previo a su uso, **examine cuidadosamente** que el producto esté correctamente ensamblado, que no existan partes dañadas o faltantes. Remueva cualquier objeto extraño antes de su uso. El producto debería ser reemplazado si existiera algún componente dañado o faltante. 
- 2** Retire la tapa de su IDM. Antes del uso, asegúrese que las instrucciones provistas con su IDM hayan sido leídas. 
- 3** Agite el IDM. Antes de cada uso según las instrucciones provistas por su fabricante. Inserte el IDM en la base de la **PromepAR®**. 
- 4** Posicione la máscara sobre el rostro y asegúrese un eficaz sellado entre la máscara y el rostro. 
- 5** Mientras mantiene un eficaz sellado entre la máscara y el rostro, **el paciente debe exhalar a través de la máscara.** La exhalación sale de la cámara a través de la válvula exhalatoria montada en la máscara. 
- 6** El IDM debería ser disparado mientras el paciente inicia una lenta inhalación. Mantenga un eficaz sellado entre la máscara y el rostro, y asegúrese que el paciente tome entre 5-6 respiraciones a través de la cámara después del disparo del IDM. Asegúrese se cumple con la dosis indicada por el profesional médico y que solo un disparo de medicación es entregado por vez. 
- 7** Siga las instrucciones provistas con el IDM en relación al tiempo que es necesario esperar antes de repetir las instrucciones 3-6 como fue prescripto. 

Modelos PromepAR:

Neonatal

AB00101

PromepAR® Aerocámara

con máscara para bebés



Pediátrica

AB00102

PromepAR® Aerocámara

con máscara para niños



Adulto

AB00104

PromepAR® Aerocámara

con máscara para adultos



* Las imágenes son sólo a modo ilustrativo.

PRECAUCIONES:

- * Utilice solamente bajo indicación de un profesional médico y lea las instrucciones antes de usar.
- * No deje la **PromepAR® Aerocámara** al alcance de los niños sin cuidado de un adulto.
- * No desarme el producto más allá de lo indicado en las instrucciones de lavado, o el producto puede dañarse.
- * La **PromepAR® Aerocámara** es un producto médico. Para garantizar una correcta performance debe ser higienizada de acuerdo a estas instrucciones. No debe ser lavado en lavaplatos. El producto puede sufrir daños permanentes si es hervido, esterilizado o lavado a temperaturas superiores a 70°C.
- * Lea y siga las instrucciones provistas con su IDM.
- * Este producto no contiene látex.

Fabricado por:

Aeromedical
Sociedad Anónima

Baldomero F. Moreno 3855,
C1407HSC - CABA - Argentina.
Tel. / Fax: (+54) 11 4611-5688.
Autorizado por ANMAT.
PM-833-14
DT. Farm. Mariela Szirko.
M.N. 13.061
email: info@aeromedical.com.ar
web: www.aeromedical.com.ar



Importado por:
PROMEPAR S.A.
Carr. Rivas Esq. Yvapurindy.
San Lorenzo.
Teléfono: (021) 573-112.
D.T.: O.F. Myriam Cabriza
Reg. Prof. Nº 2.837.
Venta Autorizada por la D.N.V.S. del
M.S.P. y B.S. -
Reg. N.º: 00086-01-DM